


VRI CareConnect


Vitals Monitoring - SEGUIMIENTO DE SIGNOS VITALES

MONITOR DE PRESIÓN ARTERIAL (si aplica)


- 1** Desempacar la máquina medidora de presión o tensiómetro.

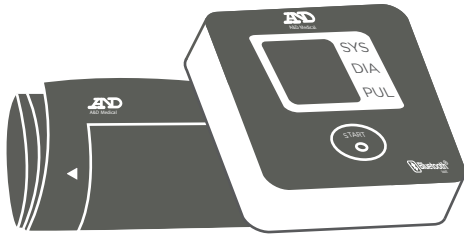


- 2** Inserte conector de la manguera de el brazalete al lado izquierdo de su monitor de presión arterial.

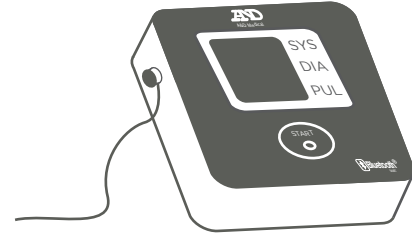


- 3** Ponga el monitor boca abajo. Mueva hacia abajo con su dedo la tapa del comportamiento de la batería para abrirlo.

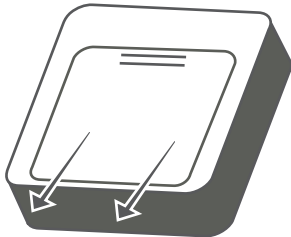


- 4** Inserta las **4 AA BATERIAS** (que viene complementarias) y cierre la tapa del comportamiento de las baterías.

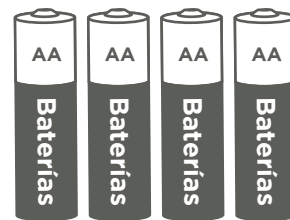

- 5** Coloque el brazalete de la presión alrededor de su brazo. Para mejores resultados siéntese derecho y coloque el brazalete al mismo nivel del corazón.

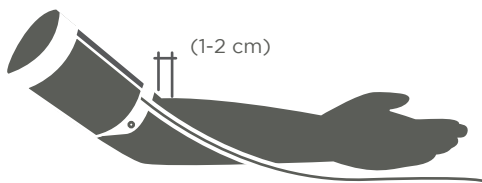

- 6** Presione el **Botón de inicio** para obtener su lectura de su presión arterial. Mientras se tome la presión por favor trate de no moverse o hablar.

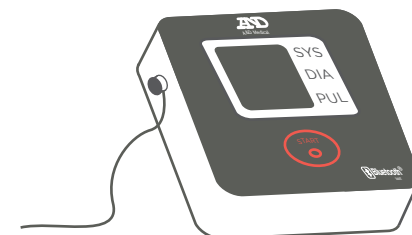

- 7** Cuando termine su proceso de monitorización arterial por favor llame a nuestro equipo de seguimiento de signos vitales al **1-888-875-0976** y presione "8" para verificar que su lecturas si fue recibida.